

The Switch

Dags att byta vinkelstycke?



Minskad aerosolspridning med Z95L Switch


Mycket forskning återstår innan vi vet tillräckligt om Covid-19 men som en extra försiktighetsåtgärd har NSK tagit fram Z95L Switch – ett "rött" uppväxlat vinkelstycke med en funktion som stänger av luften. Borren kyls då med jetstråle istället för spraymist, vilket innebär att dropparna inte finfördelas och inte får lika omfattande spridning.

Nyhet!

Clean Head System och det **inbyggda microfiltret** stoppar återsug av aerosoler och andra partiklar vilket hjälper till att förhindra kontaminering av unitens vattenledningar.



Turbinvinkelstycke

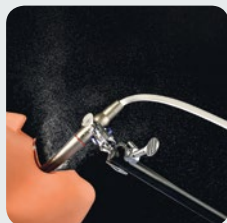

Lågvarv spraymist



Z95L Switch jetstråle



Genom att vrida om en skruv på bakstycket ändras läget från vanlig kylning genom spraymist till en vattenstråle med optimal anpassning för att kyla borren.



Box 37, 911 21 Vännäs,
Tel. 0935-131 11, info@tsdental.se, www.tsdental.se



NSK:s sortiment kan även köpas via Svensk
Dental service / www.dental-service.se