

Kan du förenkla bonding-proceduren utan att kompromissa med kvaliteten?

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

Effektivitet och hållbarhet är nyckelbegrepp för de flesta som är verksamma inom dagens tandvård. CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 är en lösning som är effektiv, har hög prestanda och som ger exceptionellt bra resultat. Med sin Advanced Rapid Technology tillåter den här adhesiven snabb och enkel applicering eftersom alla onödiga moment eliminerats och teknikkänsligheten reducerats.

Vad är CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2?

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 är en avancerad adhesiv för dentalt bruk som designats för smidig användning. Produkten är kompatibel med den estetik som du föredrar, den ger stark vidhäftning till emalj och dentin och garanterar ett starkt och uniformt bindningsskikt. Produktens mångsidighet gör den användbar för både direkta och indirekta ersättningar liksom för kärnupbyggnad och intraoral reparation av protetik.

I Vilka Sammanhang Kan Man Använda Den Här Bondingen?

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 är perfekt för tandläkare som söker efter en pålitlig och lättanvänd adhesiv. Oavsett om det är vanliga direktyfyllningar eller olika indirekta behandlingar som ska göras, levererar den här adhesiven alltid jämna resultat och en förenklad arbetsgång.

När kan man använda CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2?

Den här bondingen är gjord för att kunna användas vid en lång rad indikationer:

- ✓ Fyllningar med ljushärdande komposit
- ✓ Som försegling av kavitet eller preparerad tand vid proteteisk behandling
- ✓ För att behandla och skydda exponerade rotytor
- ✓ Behandling av ilningar i tänderna
- ✓ Intraoral reparation av protetik
- ✓ Cementering av pelare och kärnupbyggnad
- ✓ Vid cementering av protetiska konstruktioner





Vad gör CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 så bra?

Nyckeln till den exceptionella prestandan är Advanced Rapid Bond Technology, innehållande tre högpresterande beståndsdelar:

- ✓ **Original MDP Monomer:** En monomer som tagits fram av KURARAY CO., LTD och som ger oöverträffad stark, stabil och hållbar bindning till hydroxylapatit och en lång rad protetiska material - inklusive zirkonia.
- ✓ **Amidmonomer:** En höggradigt hydrofil monomer som tillåter snabb penetration av tandstruktur och som eliminerar väntetiden efter applikation. Under polymeriseringen etablerar monomeren ett stabilt och hydrofobt, korslänkat nätverk som bidrar till stark och hållbar bindning.
- ✓ **Uretantetrametakrylatmonomer (UTMA):** En monomer med flera funktioner som stärker bindningen i sig, minskar graden av polymerisationskrampning och bidrar till ett tunt och jämnt adhesivskikt.

Tillsammans utgör de här tre monomererna grunden för CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 och ger en snabb, pålitlig adhesiv som kan användas i alla dina restaurativa behandlingar.

Varför ska du välja CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2?

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 gör arbetet effektivare utan att kompromissa med kvaliteten. Advanced Rapid Technology, som innehåller MDP-, Amid och Uretantetrametakrylat (UTMA)monomerer, ger ett starkt och jämnt bindningsskikt och utmärkt vidhäftning till både emalj och dentin. Den lågviskösa formulan minskar risken för ojämheter och ger en tunn och jämn film som ökar förutsägbarheten i behandlingen.

Fler fördelar:

- ✓ Snabb och enkel applikation
- ✓ Jämn och hållbar bindning
- ✓ Kan användas tillsammans med många olika restaurativa tekniker.
- ✓ Minimerad risk för ojämn tjocklek och kontamination
- ✓ Kompatibelt med självadhesiva resincement
- ✓ Praktisk förvaring i rumstemperatur

Hur använder du CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2?

Applikationen är enkel och effektiv och passar i många kliniska situationer. Adhesiven kan användas vid:

- **Självets** - för ett modernt, snabbt och effektivt förfarande
- **Selektiv etsning** - för starkare emaljbinding
- **Totaletsning** - vid konventionella behandlingar

Adhesiven finns att tillgå i både flaska och engångsdoser för att svara upp mot olika behov och för att garantera enkel användning vid behov.

ALLA ETSTEKNIKER



Självetsande
(utan fosforsyra)



Selektivetsning
(fosforsyra på emalj)



Totalets
(fosforsyra på både emalj och dentin)



Den Ultimata Lösningen för Bonding: CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

Är den senaste uppfinningen inom dental bonding och garanterar effektivitet, pålitlighet och mångsidighet. Adhesiven förenklar ditt arbete och är garanten för starka och hållbara bindningar i ett enda skikt -utan väntetid och överdrivet gnuggande. Exceptionell prestanda och enkelt handhavande gör att den här produkten gör skäl för beteckningen universaladhesiv.

Hjärtat i universalsortimentet


Våra universalprodukter förenklar ditt arbete, erbjuder högkvalitativa material och verktyg som fungerar smidigt tillsammans med dina egna fackkunskaper. CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 är bokstavligen länken mellan många av våra re-

sinbaserade universalprodukter. Dessutom behövs ingen separat aktivator för dualhärdning ens när du använder produkten tillsammans med självhärdande cement från andra tillverkare.



Framtidssäkra tiotandvården med bara 5 smarta produkter


CLEARFIL MAJESTY™
ES-2 Universal

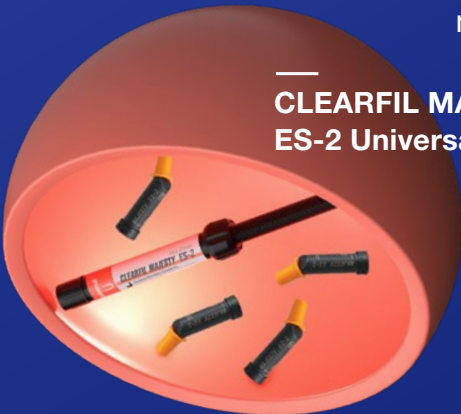

KATANA™
Cleaner



CLEARFIL™ Universal
Bond Quick 2

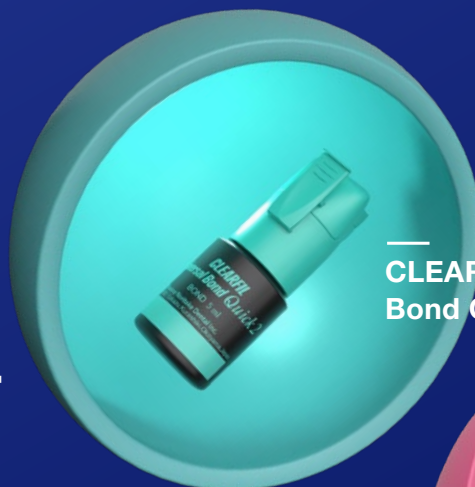

CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow Universal



PANAVIA™
SA Cement
Universal

